



Medisinsk oksygen IPR

Integrert regulator - bruksanvisning

Modell: "Viproxy 1 touch" (kombinert flow-regulering og stengeventil)

Før bruk

- Ikke bruk medisinsk oksygen fra Nippon Gases etter utløpsdato. Kontroller derfor alltid utløpsdato på produktetiketten før bruk.
- Sjekk hvor mye oksygen som er igjen på flasken ved å lese av *trykkmåleren (4)*.

Ved bruk av slangenippel (2):

1. Koble utstyr til *slangenippel (2)*.
2. Velg flow ved å vri *flowvelgeren (1)* sakte mot venstre.
3. Flowsteg 0,5 - 15/25L gir flow på *slangenippel (2)*.
4. Etter bruk justeres *flowvelgeren (1)* til stengeposisjon ved å vri godt til høyre (med klokken). Det vil vises små streker i vinduet.
5. Koble av utstyret fra *slangenippel (2)*.

Ved bruk av hurtigkobling (3):

1. Koble det medisinske utstyret til *hurtigkobling (3)*.
2. Juster *flowvelger (1)* til **flowsteg (A)** for å åpne flow på *hurtigkoblingen (3)*.



Str.	Trykk	3 l/min.	6 l/min.	12 l/min.
2 L	200 bar	2t 10 min	1t 5 min	30 min
3 L	200 bar	3t 20 min	1t 40 min	50 min
5 L	200 bar	5t 30 min	2t 45 min	1t 20 min

Tabellen viser omtrentlig varighet på gassen ved ulike doseringsmengder.

Sikkerhetsregler

- Røyking og åpen ild er forbudt der produktet brukes.
- IPR flasken flyttes om mulig til sikker plass ved fare for brann.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet der oksygen lagres / brukes.
- IPR flasken må ikke utsettes for sterk varme eller for etsende stoffer.
- La aldri fett og/eller olje komme i kontakt med utstyret.
- Kontroller at sylindere ikke er skadet. Ved skade kontakt Nippon Gases umiddelbart.
- Før åpning av ventilen eller åpning av sylindere, sørg for at hendene er rene. Ved bruk av såpe eller gel med alkohol, sørg for at den har fordampnet helt.
- Produktet er MR kompatibel opptil 3,0 tesla. Ventil på IPR flasken må ikke være nærmere enn 30 cm fra magnetens åpning.