

# Medisinsk oksygen

Produktdatablad - kompositt/lettflaske IPR

Nippon Gases innehar nødvendige myndighetskrav og tillatelser for produksjon og omsetning av medisinsk gass. Kravene defineres i hovedsak av Legemiddelforskriften av 2009. Våre gasser til medisinsk bruk er fremstilt i overensstemmelse med "Good manufacturing Practice Medicinal gases" (cGMP), og distribueres til kunden etter "Good Distribution Practice" (cGDP).

Flasker med IPR (Integrated Pressure Regulator) er en trygg og enkel løsning for gassterapi i helsevesenet. Flaskene er lette i vekt, har integrert ventil, regulator, hurtigkobling og flow-velger. Flaskene leveres i 2 -, 3 - og 5 - liters størrelse. Flaskene er MR kompatible.



# Medisinsk oksygen







## Produktdatablad - kompositt/lettflaske IPR

### Tekniske data:

Flaskemateriale:	Kompositt/lettflaske
Ventil:	IPR ( <a href="#">se egen brukerveiledning</a> )
Flow (lpm):	0-15 L / 0-25 L
MR kompatibel:	Opp til 3.0 Tesla
Fylletrykk maks:	200 bar
Utløpstrykk i hurtigkoblingen:	4 bar ( $\geq 40$ L/min)
Temperatur anvendelsesområde:	- 20°C / + 45°C
Flaskefarge:	Hvit sylindarfarge og hvit skulderfarge
Transportkode:	UN 1072
Holdbarhet:	3 år

### Sikkerhetsinstruks for anvendelse og håndtering:

- Medisinske gasser skal bare brukes til medisinske formål. Flaskene skal oppbevares i ventilerte rom og ikke utsettes for høy varme.
- Bruk bare standard utstyr som er tilpasset for medisinsk oksygen.
- Røyking og åpen ild er absolutt forbudt i rom hvor våre gasser anvendes.
- La aldri olje eller fett komme i kontakt med utrustningen.
- Kontroller at flaskene er forseglet samt ta bort forseglingen fra ventilen før bruk.
- Kontroller at den automatiske koblingen eller regulatoren er ren og at tilkoblingene er i god stand.
- Åpne alltid flow-velger sakte ved å vri mot venstre. Flaskeventilen kan være hard å åpne inntil man kommer til 1. flowsteg (0,5 L).
- Dersom det oppdages skader, steng ventilen og koble fra defekt utstyr og returner til leverandøren.
- Nippon Gases leieflasker er utstyrt med restgassventil som beskytter mot forurensing (av flaskens innside)
- Flaskeventilen/flowvelger stenges for hånd etter bruk. Avlast deretter trykket i regulator eller annen tilslutning.
- Ved brann eller brannfare skal om mulig utrustningen stenges.

Flaskestørrelse	2 L	3 L	5 L	10 L
	Bestillingsvare			Bestillingsvare
				
Varenummer gass	502623	503172	502624	504038
Varenummer dagleie	801536	801536	801536	801536
Flaske materiale	Kompositt / aluminium	Kompositt	Aluminium	Aluminium
Høyde inkl. ventil (mm)	560	595	680	1050
Diameter (mm)	100	115	135	140
Vekt inkl. gas (kg)	3,8	4,3	7,5	12,55
Volum i L	400	600	1000	2000

Nippon Gases forbeholder seg retten til endringer i denne spesifikasjonen som følge av lovkrav, råvarer, produksjonspesifikasjon o.l. For sikkerhetsdatablad eller annen informasjon se våre hjemmesider [www.nippongases.no](http://www.nippongases.no)

